


セット内容

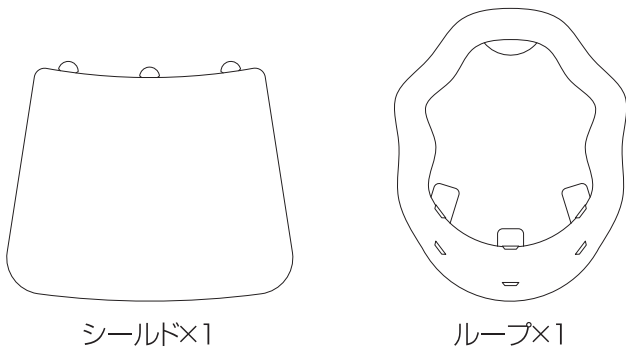

シールド×1


ループ×1

⚠ 注意事項

- ・本品は全ての飛沫物から保護できるものではありません。
- ・使用後は汚れている可能性があります。外す際は素手での取り扱いにご注意ください。
- ・火のそばでの使用はお控えください。
- ・運転時などは使用しないでください。
- ・本品の断面や角で顔や手を傷つけないようご注意ください。


商品:PP 袋:PE

組み立て方

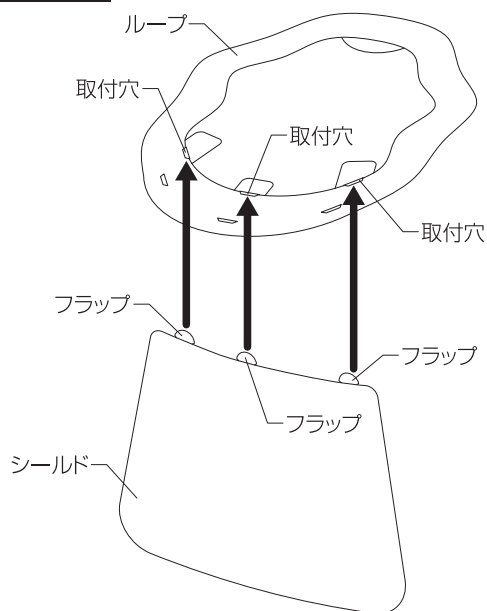


シールドのフラップ3ヶ所を、ループの取付穴に差し込んでください。

手前の取付穴にセットする場合

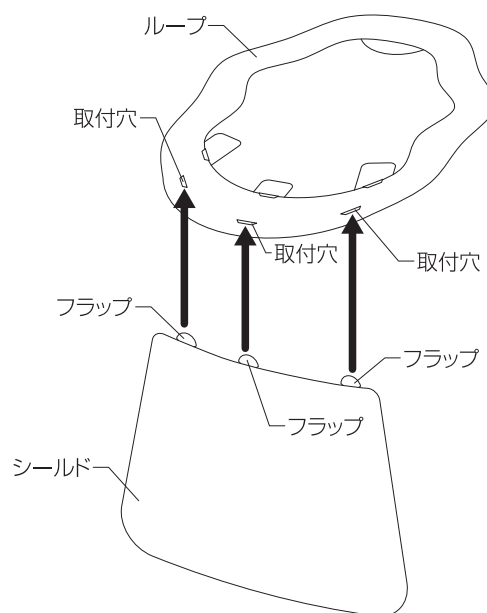


ループの手前の取付穴に差し込むと、顔からシールドを離してご使用いただけます。

完成図

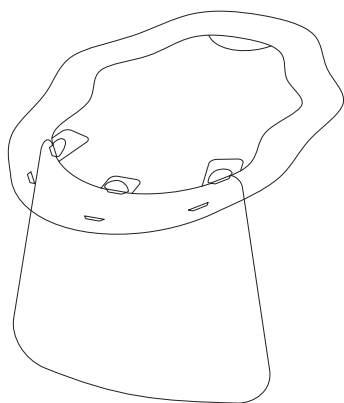


使用例

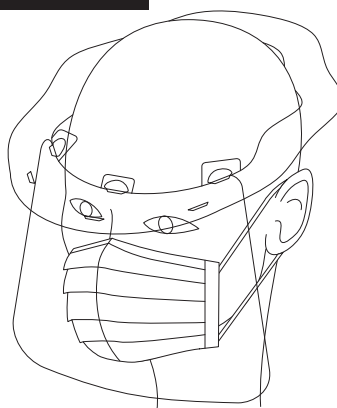

※マスクと併用されると、より安全です。

手前の取付穴にセットする場合

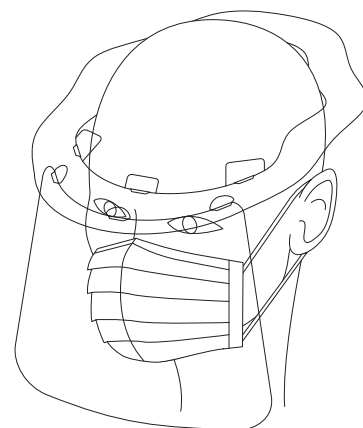

※顔から離してご使用いただけます。